


**服薬情報提供書（シーブリーズヘラーチェックシート）**

Ver.20190520

**担当医** \_\_\_\_\_ **科** \_\_\_\_\_ **先生** \_\_\_\_\_

\* 確認した項目について、その評価を確認欄に○△×にてご記入いただき、適宜コメント等記載のうえ、当院薬剤部までFAXしてください。

京都第二赤十字病院薬剤部 直通TEL:075(212)6940 FAX:075(212)6113

		問題なし: ○	やや不安あり: △	不安あり: ×	確認 (○△×)
アドヒアランス	1	毎日決まった時間に吸入をする（時）			
準備	2	吸入直前に、乾いた手でアルミシートを剥がし、1カプセルを取り出す * アルミシートからカプセルを押し出さない		 * 飲み薬ではありません カプセルに上下はありません	
	3	キャップを外し、マウスピース(吸入口)を開ける			
	4	カプセルを穴に入れ、マウスピースを「カチッ」と音がするまでしっかり閉める			
	5	吸入口を上向きにして、両側のオレンジ色のボタンを同時にしっかり最後まで押し、ボタンを離す * カプセルに穴が開いて、薬を吸入できるようになる			
	6	【息吐き】無理をしない程度に、2～3秒ほど息を吐きだす * マウスピースに息を吹きかけない			
吸入	7	【吸入】マウスピースをくわえ、正面を向いたまま、速く、出来るだけ深く息を吸い込む * カラカラとカプセルの回転する音が聞こえる程度			
	8	【息止め】マウスピースから口を離し、無理をしない程度に、5秒程度息を止める			
	9	【息吐き】ゆっくり息を吐きだす * マウスピースに息を吹きかけない			
	10	マウスピースを開けてカプセル内に薬が残っていないか確かめ、残っている場合は薬を完全に吸い込むまで、6～9を繰り返す			
うがい	11	【吸入後】うがい、または口すすぎをおこなう			
片付け	12	マウスピースを開けて、カプセルは直接手に取らず、そのままゴミ箱に捨てる			
保管と管理	13	週に1度、乾いた清潔な布などでマウスピースの内側と外側をふき取る(水洗いはしない) 30日を目安に、新しい吸入器(ブリーズヘラー)と交換する			

【確認日】 年 月 日 【服薬情報提供に関する患者の同意】  あり  なし

【患者ID】 \_\_\_\_\_ 【保険薬局名(TEL)・担当薬剤師】 \_\_\_\_\_

【患者名】 \_\_\_\_\_ 様

【初回処方日】 年 月 日

【確認回数】 初回 ・ 2回目 ・ 3回目 ・ ( )回目

【コメント】 \_\_\_\_\_